



CAREX®

Tri-grip Bathtub Rail Barra para bañera con tres puntos de apoyo




B202

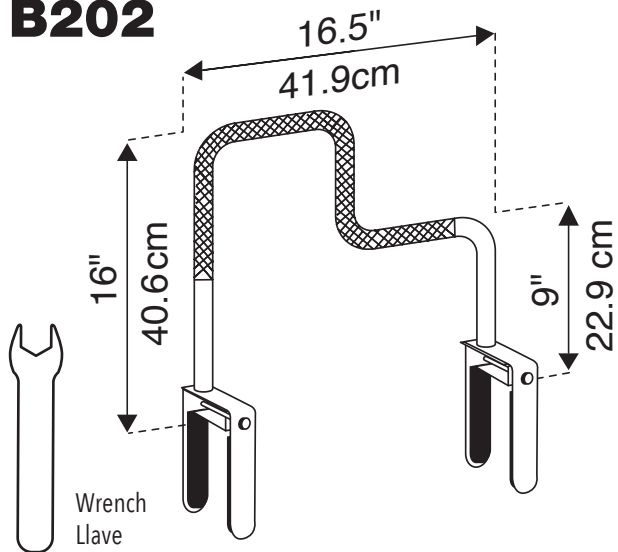

1

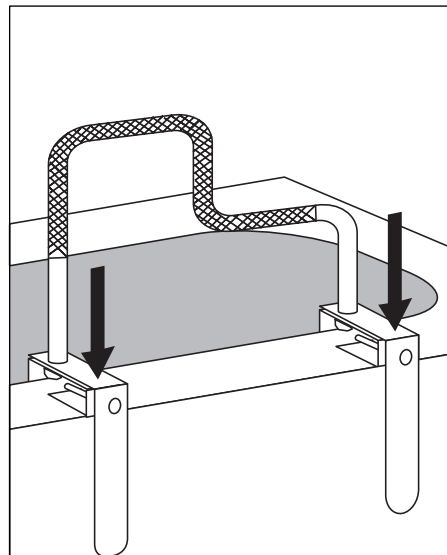


2

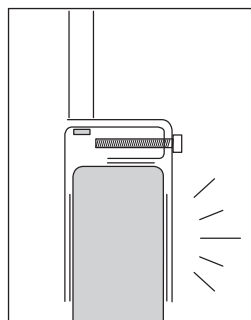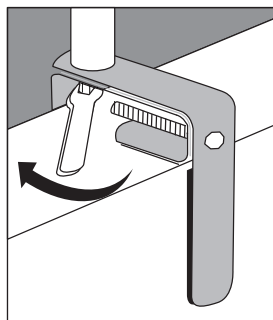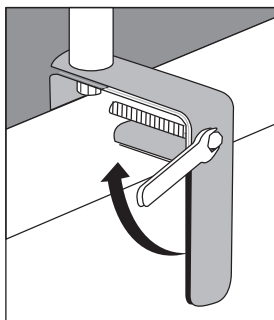

CAUTION: Tub Rail should fit tightly against the Tub.


PRECAUCIÓN: El riel de la tina debe encajar firmemente contra la tina.

3

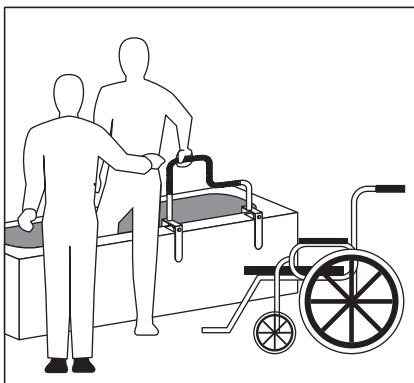


CAUTION: Person in wheelchair should be assisted while using the Tub Rail.

PRECAUCIÓN: Se debe ayudar a la persona en silla de ruedas mientras usa el riel de la bañera.

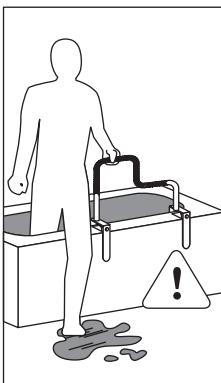


CAUTION: Be sure floor is dry before using the Tub Rail.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el piso esté seco antes de usar el riel de la tina.

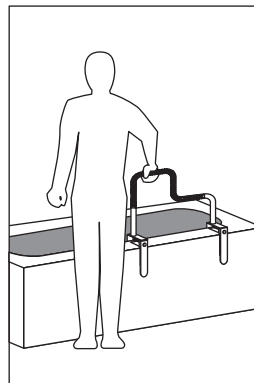

CAUTION: Secure hand on Tub Rail before getting into the Tub.

PRECAUCIÓN: Asegure la mano en el riel de la tina antes de entrar a la tina.

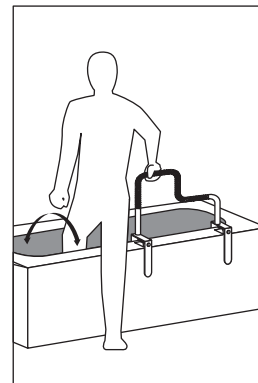

CAUTION: Place one leg over the Tub at a time while hand is securely on the Tub Rail.

PRECAUCIÓN: Coloque una pierna sobre la tina a la vez mientras la mano está asegurada en el riel de la tina.

COMPASSHEALTH

42-B20200_04 © 2022

Manufactured for / Fabricado por: Compass Health Brands Corp.
Middleburg Heights, OH 44130 • www.compasshealthbrands.com
Phone / Teléfono 800.376.7263 • Made in China / Hecho en China